

Compass SportTM



Manual de usuario

Compass SportTM

Silla mecánica de tracción central

GP605 CC/GP605 SS



401 Bridge Street, Old Forge PA 18518
Tel: (800) 624-6374 Fax: (800) 628-5165
www.goldentech.com

PARA SU REFERENCIA

Por favor llene los datos de su Compass Sport™. Esta información será útil en el caso que alguna vez necesite contactar a Golden Technologies, Inc. en relación a su silla mecánica.

Su Compass Sport™

Modelo _____ Número de serial _____

Fecha de compra _____ Color _____

Opciones _____

Su representante o proveedor de Golden Technologies, Inc.

Nombre _____

Compañía _____

Dirección _____

Por favor recuerde llenar y devolver la tarjeta de registro de su garantía

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Su Compass Sport™ es enviado con los elementos listados a continuación. Antes de armar o deshacerse del material de empaque, por favor asegúrese de haber recibido todos los elementos listados.

1. Base (Marco con módulo de energía, cable de mando, ruedas, reposapiés y cubiertas)
2. Asiento con reposabrazos y un receptor de accesorios
3. Banderilla de seguridad
4. Cargador con bolsa de viaje
5. Mando
6. Cinturón de seguridad
7. Baterías (Dos -U1) con cables incluidos



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Le pedimos que lea este manual completamente antes de operar su nuevo Compass Sport™. Golden Technologies, Inc. no es y no puede ser responsabilizado por ningún daño o lesión incurrida debido al uso inapropiado o inseguro del Golden Compass Sport™. Golden Technologies, Inc. específicamente renuncia a la responsabilidad de cualquier lesión corporal o daño material que podría ocurrir durante cualquier uso que no cumpla con las ordenanzas o leyes aplicables locales, estatales o federales.

CONTENIDO

| | |
|------------------------------|-------|
| INTRODUCCIÓN..... | 4-5 |
| SEGURIDAD | 6-9 |
| EMI/IRF | 10 |
| ESPECIFICACIONES... .. | 11 |
| ARMADO/DESMONTAJE..... | 12-16 |
| AJUSTES DE SEGURIDAD..... | 17-20 |
| OPERACIÓN/DIAGNÓSTICOS..... | 21-27 |
| CARGANDO LAS BATERÍAS..... | 28-29 |
| CUIDADO Y MANTENIMIENTO..... | 30 |
| GARANTÍA..... | 31-32 |
| TARJETA DE REGISTRO... .. | 33 |

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por la compra de su nuevo Compass Sport. El Compass Sport combina tecnología de punta con diseños atractivos que también son muy funcionales en el mundo de hoy. Nosotros en Golden Technologies, Inc. sabemos que usted ha elegido una silla mecánica que le dará años de funcionamiento confiable y que también mejorará su calidad de vida proporcionándole la movilidad suficiente para vivir un estilo de vida activo todos los días.

Aunque su nuevo Compass Sport es fácil de usar y está diseñado para la máxima maniobrabilidad inclusive en los espacios más cerrados, le pedimos que por favor lea, entienda y siga todas las instrucciones y sugerencias en este manual antes de que utilice su Compass Sport por primera vez. El uso seguro de su nueva silla mecánica es muy importante para nosotros.

Si siente que no entiende las instrucciones ni las sugerencias presentadas en este manual de usuario, o si por cualquier razón, usted no se siente capaz de realizar las actividades necesarias para armar, desarmar, operar o mantener su Compass Sport, por favor contacte a su proveedor local de Golden Technologies, Inc. o llame al servicio de Atención al Cliente de Golden Technologies, Inc. marcando al (800) 624-6374.

Golden Technologies, Inc. no será considerado responsable por lesiones personales o daños de propiedad resultantes del uso inseguro o inapropiado de cualquiera de nuestros productos de movilidad. Además, Golden Technologies, Inc. no será responsable de daños personales o daños materiales resultantes de intentar seguir las instrucciones, sugerencias o lineamientos presentados en este manual de usuario.

Golden Technologies, Inc. se reserva el derecho de implementar cambios en nuestras líneas de productos cuando esos cambios se vuelvan deseables o necesarios. Si se implementan cambios en nuestra línea de productos, podría haber diferencias menores entre el producto que usted compró y las ilustraciones e instrucciones en este manual de usuario.

Por favor llene y envíe por correo la tarjeta de registro de garantía incluida en la página 33. El registro también está disponible en www.goldentech.com. Nosotros en Golden Technologies, Inc. apreciaríamos escuchar sobre la fiabilidad de su Compass Sport y sobre la conveniencia en la movilidad que le ha proporcionado. Nosotros también apreciaríamos escuchar sobre el servicio que recibió de su proveedor o representante local de Golden Technologies, Inc.

Golden Technologies, Inc.
401 Bridge Street
Old Forge, PA 18518

Teléfono: (570) 451-7477
Fax: (570) 451-7494
Número gratuito: (800) 624-6374

Página web: www.goldentech.com

INTRODUCCIÓN

ACCESORIOS para el *Compass Sport*

Una gran variedad de accesorios están disponibles para su *Compass Sport*. Contacte a su proveedor autorizado de *GT* para obtener más información o para ordenar una/un:

- Soporte de bastón - tubo
- Soporte de andadera
- Pack N' Go Deluxe
- Soporte de tanque de oxígeno
- Soporte de muletas
- Cinturón de seguridad
- Portavasos
- Banderilla de seguridad
- Soporte de bastón cuádruple
- Funda de la silla mecánica

*Algunos accesorios requieren de un soporte de montaje o clips de montaje. Por favor verifique con su proveedor para saber si el accesorio que le gustaría ordenar requiere de un soporte o clips de montaje.

Lineamientos de seguridad

Los símbolos a continuación son utilizados en el manual de usuario y/o en el producto para identificar advertencias y notificarle sobre información de seguridad importante. Asegúrese de leerlos y entenderlos completamente.



¡ADVERTENCIA! Indica una situación peligrosa, la cual, si no es evitada, podría resultar en muerte o lesiones serias. Este ícono está representado como un símbolo negro o un triángulo amarillo con un borde negro.



¡OBLIGATORIO! Fallar en realizar acciones obligatorias puede causar lesiones personales y/o daños de equipamiento. Este ícono está representado como un símbolo blanco y un punto azul con un borde blanco.



¡PROHIBIDO! Indica una acción que no debería ser realizada bajo ninguna circunstancia. Fallar en adherirse a esto puede causar lesiones personales y/o daños de equipamiento. Este ícono está representado por un símbolo negro con un círculo rojo y una barra diagonal roja.

Símbolos de seguridad

Los símbolos a continuación identifican advertencias, acciones obligatorias y acciones prohibidas. Pueden encontrarse en el manual de usuario y/o en el producto. Asegúrese de entender todas las etiquetas de seguridad antes de operar el producto. No remueva las etiquetas de seguridad del producto.



¡Lea y siga el manual de usuario!!



¡Existen condiciones explosivas!



¡Usar solo en espacios interiores!



¡Utilice solo baterías AGM o de gel!



¡Evite transmisores!



¡Superficie caliente!



¡Peligro de pellizco / aplastamiento



¡No lo ponga en la basura!



¡Peligro eléctrico!



¡Químicos corrosivos adentro de la batería!



Recíclelo



¡No utilice dispositivos electrónicos personales!

SEGURIDAD

Su *Compass Sport* es un vehículo de movilidad personal operado a batería. Por favor sea precavido y considerado cuando lo maneje. Conducir su *Compass Sport* cuidadosa y conscientemente ayudará a asegurar su seguridad personal y la seguridad de otras personas.



¡OBLIGATORIO! Lea y siga el manual de usuario antes de manejar su silla mecánica.

NOTICE

Antes de manejar su *Compass Sport*, por favor asegúrese de leer y entender este manual de usuario completamente. Si existe alguna inquietud después de leer este manual, por favor pida más instrucciones o entrenamiento de parte de su Proveedor / Representante de Golden..

ANTES DE SUBIRSE EN SU *Compass Sport*TM

- ◆ Asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Vea la sección de “Operación” en las páginas 21-27. Esto eliminará la posibilidad de activar accidentalmente el control a palanca, causándose una lesión usted y a otros.
- ◆ Asegúrese de que su *Compass Sport* no esté en modo rueda libre. Vea la sección de “Operación” en la página 26.
- ◆ Suba los reposabrazos.
- ◆ Si su silla está equipada con reposapiernas, muévalos hacia los lados.
- ◆ Si su silla está equipado con reposapiés, llévelos hacia arriba.

SUBIÉNDOSE EN SU *Compass Sport*TM

- ◆ Posicione el asiento para montarse fácil y seguramente.
- ◆ Ajuste los reposapiernas o pliegue hacia abajo el reposapiés.
- ◆ Pliegue hacia abajo los reposabrazos.
- ◆ Asegure el cinturón de seguridad.

BAJÁNDOSE DE SU *Compass Sport*TM

- ◆ Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
- ◆ Desabroche el cinturón de seguridad.
- ◆ Suba los reposabrazos.
- ◆ Suba el reposapiés, o mueva el reposapierna hacia los lados.
- ◆ Póngase de pie cuidadosamente y aléjese de la silla.

PESO MÁXIMO

Su *Compass Sport* ha sido clasificado para una carga máxima útil (con el operador y cualquier cosa llevada por el *Compass Sport*) de 300 libras. Exceder el peso máximo invalidará la garantía.



Exceder el peso máximo invalidará la garantía y puede resultar en lesiones personales y/o hacia otras personas.

SEGURIDAD

CONDUCIENDO EN CUESTAS

- Conduzca con **precaución** cuando intente pasar por cualquier cuesta, inclusive en rampas para discapacitados.
- Intente mantener su *Compass Sport* en movimiento cuando suba por una cuesta. Si se detiene, reinicie y acelere lenta y cuidadosamente.



- **Siempre** escale o descienda una cuesta conduciendo de forma recta hacia arriba o debajo de la pendiente.
- **No** atraviese ni conduzca por ningún lado de una cuesta
- **No** intente pasar sobre una cuesta que esté cubierta con nieve, hielo, pasto cortado o mojado, hojas o cualquier otro material potencialmente peligroso
- **No** retroceda por una cuesta.
- **No** intente descender o subir una pendiente cuya inclinación sea mayor a la recomendada. La inclinación máxima recomendada es de **6°**.



Si, mientras está bajando por una cuesta, su silla mecánica comienza a moverse más rápido de lo que usted cree que es seguro, suelte el control a palanca y permita que su *Compass Sport* se detenga completamente. Cuando sienta que tiene de nuevo control sobre su silla mecánica, continúe bajando de forma segura el resto de la cuesta.

MEDICACIÓN

Siempre hable con su médico para determinar si algún medicamento que esté tomando podría afectar su juicio y/o su habilidad de operar su *Compass Sport*. Además verifique con su doctor sus habilidades físicas para operar una silla mecánica.

SEGURIDAD

REGLAS DE SEGURIDAD



- **No** intente utilizar su *Compass Sport* en una escalera. Siempre utilice un ascensor.
- **No** cargue pasajeros bajo ninguna circunstancia.
- **Nunca** opere su *Compass Sport* si no está funcionando apropiadamente.
- **Siempre** sea precavido cuando conduzca en superficies suaves o desiguales como pasto o gravilla. También sea precavido en pisos donde no haya barandillas.
- **Nunca** conduzca en la carretera, excepto cuando deba cruzar la calle.
- **Siempre** cruce las calles en intersecciones y usando cruces peatonales o la ruta más directa, asegurándose de que su camino esté despejado y que sea visible por el tráfico
- **No es recomendado** conducir su *Compass Sport* hacia arriba o debajo de una escalera o cuneta que sea mayor a 1-1/2 pulgadas.
- **Nunca** retroceda hacia arriba o abajo de un escalón o banqueta
- **Nunca** maneje su *Compass Sport* si está bajo la influencia del alcohol.
- **No** opere o almacene su silla mecánica donde estará expuesto a lluvia, nieve, niebla y temperaturas congelantes.
- **No** conduzca su *Compass Sport* en superficies resbaladizas o congeladas.
- **Nunca** se siente en su silla mecánica cuando esté en modo rueda libre o en una subida o bajada.
- **No** modifique su silla mecánica de ninguna forma que no sea autorizada por Golden Technologies, Inc.
- **No** desarme la llanta. Si es necesario desarmarla, haga que su proveedor autorizado de Golden Technologies realice cualquier mantenimiento o reparación necesaria.
- **No** intente inflar las llantas de su *Compass Sport*. Su silla mecánica está equipada con neumáticos antipinchazos que no necesitan ser inflados.
- **Nunca** se siente en su *Compass Sport* cuando esté siendo transportado.
- **Siempre** sujete de *Compass Sport* de forma segura con un sistema de anclaje aprobado mientras transporta su silla mecánica.

SEGURIDAD

Por favor asegúrese de seguir estas importantes advertencias de seguridad para su Silla Mecánica Compass Sport.



NUNCA SE PARE Y SIENTE DE ESTA SILLA MECÁNICA USANDO EL RESPALDAR DEL ASIENTO COMO SOPORTE. ESTE RESPALDAR PUEDE PLEGARSE Y CAUSAR QUE PIERDA EL EQUILIBRIO, Y PODRÍA RESULTAR EN UNA LESIÓN PERSONAL.



NO PERMITA QUE NADIE EXCEPTO UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE GOLDEN TECHNOLOGIES, INC. CONECTE ALGÚN DISPOSITIVO ELÉCTRICO O MECÁNICO A SU COMPASS SPORT™. LOS ACCESORIOS NO AUTORIZADOS INVALIDARÁN LA GARANTÍA Y PUEDEN CAUSAR LESIONES.

EMI/IRF

El rápido desarrollo de los dispositivos electrónicos, especialmente en el área de las comunicaciones, ha saturado nuestro ambiente con ondas electromagnéticas que son emitidas por transmisores de televisión, teléfonos celulares, radios CB (banda ciudadana), radios amateur (radioaficionado), enlaces informáticos inalámbricos, transmisores microondas, transmisores de paginación, etc. Estas ondas electromagnéticas (EM) son invisibles y aumentan su fuerza entre más cerca están a la fuente de transmisión. Cuando estas ondas de energía actúan contra los dispositivos eléctricos y causan que funcionen mal o que funcionen de forma errática o descontrolada, se refieren a ellas como Interferencia Electromagnética (EMI) o Interferencia de Radiofrecuencia (IRF)

EMI/IRF Y SU *Compass Sport*

Todos los vehículos potenciados eléctricamente son susceptibles a (EMI/IRF). Esta interferencia podría resultar en un movimiento anormal y no intencional de su Golden Compass Sport.



El movimiento no intencional o la liberación del freno podría causar un accidente o lesión.

La FDA ha determinado que toda marca y modelo de silla mecánica debe resistir EMI/IRF a un cierto nivel. Entre más alto sea el nivel de resistencia, mayor es el grado de protección contra la EMI/RFI – medido en voltios por metro (V/m). La FDA también ha determinado que la tecnología actual es capaz de proveer 20 V/m de resistencia por EMI/RFI, lo cual podría proveer protección útil contra las fuentes comunes de interferencia. Este producto ha sido probado y ha pasado un nivel de inmunidad de 20 V/m.

RECOMENDACIONES CONTRA LA EMI/IRF



¡PROHIBIDO! No encienda o utilice dispositivos electrónicos portátiles de comunicación personal como teléfonos celulares, walkie-talkies y radios CB si su silla mecánica está encendida.

- Sea consciente de cualquier transmisor cercano (radio, televisión, microondas, etc.) en su ruta prevista y evite operar su silla mecánica cerca de cualquiera de estos transmisores. Apague la silla mecánica si va a estar en una posición estacionaria por un largo periodo de tiempo.
- Sea consciente que añadir accesorios o componentes o modificar su silla mecánica puede hacerlo más susceptible a EMI/IRF.
- Si ocurre un movimiento involuntario o si se libera el freno, apague su silla mecánica tan pronto sea seguro hacerlo.
- Reporte todos los incidentes de movimiento involuntario o falla del freno al Servicio Técnico de Golden Technologies, Inc. marcando al (800) 624-6374.



Apague su silla mecánica tan pronto sea seguro hacerlo si ocurre un movimiento involuntario o incontrolable o si ocurre una liberación involuntaria del freno.

ESPECIFICACIONES

| Modelo | GP605 CC | GP605 SS |
|--|--------------------|---------------------------------|
| Código Medicare | K0823 | K0822 |
| Inclinación máxima | 6 grados | 6 grados |
| Capacidad de peso | 300 libras | 300 libras |
| Máxima velocidad | 4 mph | 4 mph |
| Rango operativo ¹ | 24 millas | 24 millas |
| Dist. al suelo bajo la plataforma | 3.25" | 3.25" |
| Radio de giro | 19.5" | 19.5" |
| Tipo de baterías | 2-U1 | 2-U1 |
| Colores | Rojo, azul | Rojo, azul |
| Cargador | Exterior | Exterior |
| Controlador | 40 Amp | 40 Amp |
| Dimensiones: | | |
| Longitud | 39" | 39" |
| Grosor (fuera de las llantas) | 24" | 24" |
| Altura (del suelo al tope del respaldar) | 38" – 40" | 40" – 42" |
| Altura (del suelo al tope del cabezal) | 45" – 50.5" | 47" – 52.5" |
| Del suelo al tope del asiento | 21" – 23" | 19" – 21" |
| Número de ajustes de altura del asiento | 3 | 3 |
| Tamaño de incrementos | 1" | 1" |
| Peso de la unidad: (armada) | 185 libras | 179 libras |
| Base | 92 libras | 92 libras |
| Asiento (Asiento cuadrado sólido 18 X 18) | | 40 libras |
| Asiento (Sillón estilo capitán 18 X 18) | 46 libras | |
| Baterías | U1 - 22 libras | U1 - 22 libras |
| Neumáticos | Antipinchazo | Antipinchazo |
| Ruedas de tracción centrales (2) | 10" | 10" |
| Pivotantes (4) | 6" | 6" |
| Asiento estándar | Asiento de capitán | Capitán/Asiento cuadrado |
| Altura del respaldar sin el cabezal | 19" | 23" |
| Altura del respaldar con el cabezal | 26.5" – 29.5" | 30.5" – 34.5" |
| Ancho x Profundidad (Profundidad ajustable) | 18" x 18" | 18" x 18", 20" x 18", 20" x 20" |
| Color | Vinilo gris | Café/Arena, Carbón/Gris |
| Asiento con levantamiento eléctrico (Opcional) | N/A | N/A |
| Asiento con levantamiento neumático (Opcional) | N/A | N/A |
| Reposapiés: | Sí | Sí |
| Altura ajustable | 3" - 7" | 3" - 7" |
| Ángulo ajustable | 0 – 35 grados | 0 – 35 grados |
| Longitud ajustable (opcional) | Sí | Sí |
| Garantía: | | |
| Armazón | Toda la vida | Toda la vida |
| Tren de transmisión | 13 meses | 13 meses |
| Electrónicos ² | 13 meses | 13 meses |
| Baterías | 12 meses | 12 meses |

1. Rango de batería a 200 libras. Variará según el peso del conductor, la superficie, el terreno y el tipo de batería.

2. La garantía de electrónicos no incluye las baterías.

Este texto está actualizado al momento de la impresión. Golden Technologies se reserva el derecho de realizar cambios al producto o al texto en cualquier momento.

ARMADO/DESMONTAJE

Su Compass Sport es enviado parcialmente desarmado para poder maximizar la protección de todas sus partes durante el proceso de envío. Por favor siga las instrucciones a continuación y arme fácilmente la silla mecánica para su uso.

NOTICE

Usted solo necesitará herramientas básicas. Si no tiene las herramientas necesarias o si no se siente capaz de armar de forma segura su silla mecánica, por favor contacte a su representante local de Golden Technologies, Inc.

Componentes principales

1. Base (Marco con módulo de energía, cable de mando, ruedas, reposapiés y cubiertas)
2. Conjunto del asiento (Asiento, cabezal, reposabrazos y receptor de accesorios)
3. Mando
4. Baterías (Dos - U1)
5. Cinturón de seguridad



Mando



Baterías

ARMADO/DESMONTAJE

NOTICE

Su *Compass Sport™* no se encenderá ni funcionará sin completar los siguientes pasos.

1. Remueva la cubierta frontal y trasera de la batería. "Accediendo a las baterías" en la pág 15.
2. Asegúrese de que ambos arneses de la batería estén conectados y anclados a la silla mecánica. Vea la imagen 7 en la página 15, y la imagen 10 en la página 16.
3. Asegúrese de que el arnés esté conectado y anclado al módulo de energía. Vea la imagen 1 en la página 14.
4. Reemplace la cubierta frontal y trasera de la batería.

INSTALACIÓN/REMOCIÓN DEL ASIENTO

Asegúrese de que el cable del mando no interfiera con el asiento durante la instalación.



El asiento estándar completo (18 x 18) pesa más o menos 21 kilos. Por favor pida ayuda si no se siente capaz de alzar de forma segura tanto peso. La remoción de los reposabrazos reducirá significativamente el peso del asiento.



Asegúrese de que el asiento esté correctamente instalado y anclado antes de operar su silla mecánica.



Nunca hale los brazos ni los utilice como asas para mover la silla, esto podría inadvertidamente desprender la barra recibidora, causando una lesión.

INSTALACIÓN

1. Para instalar el asiento, alinea el ancla del asiento en la parte inferior del mismo con el hoyo en el tubo de la silla. Vea las imágenes 2 y 3 en la pág 14.
2. Empuje hacia abajo el asiento y rótelo hasta que se alinee y se ancle en su lugar. Vea la imagen 3 en la página 14.
3. Fije los reposabrazos al aflojar la perilla de ajuste. Vea la imagen 18 en la página 20. Inserte los reposabrazos en el tubo receptor del asiento, ajuste los reposabrazos en su posición deseada y apriete las perillas para asegurarlos.
4. Fije el mando. Vea "Instalación/Remoción del mando" en la página 14.
5. Conecte el cable del mando. Vea la imagen 5 en la página 14.
6. Alce la palanca de ajuste de ángulo del respaldo (Vea la imagen 4 en la página 14) y mientras sostiene la palanca, alce el respaldo a un ángulo erguido, entonces libere la palanca para anclar el asiento en el lugar.

REMOCIÓN




1. Con una mano sujete el respaldo. Con la otra mano alce la palanca de ajuste de ángulo del respaldo y mientras sostiene la palanca, baje el respaldo contra el asiento.



Alzar la palanca de ángulo del respaldo causará que el respaldo se vaya automáticamente contra el asiento. Un manejo inapropiado puede causar lesiones.

2. Desconecte el cable del mando. Vea la imagen 5 en la página 14.
3. Remueva los reposabrazos al aflojar las perillas de ajuste, entonces deslice cada reposabrazos hacia afuera para removerlo. Vea la imagen 18 en la página 20.
4. Alce el asiento hacia arriba y afuera del tubo receptor del asiento.

ARMADO/DESMONTAJE

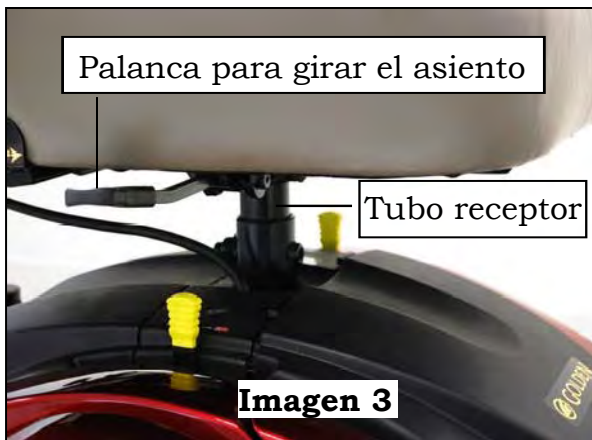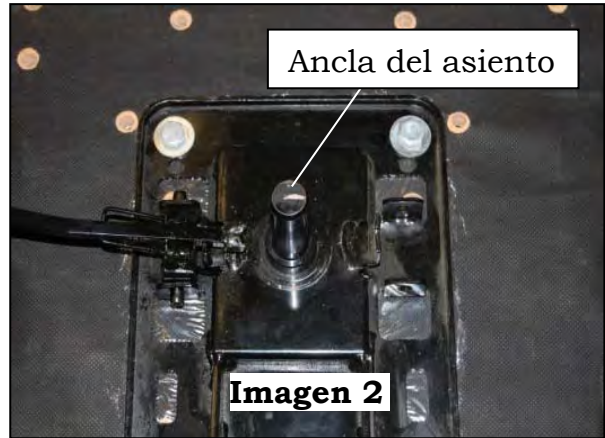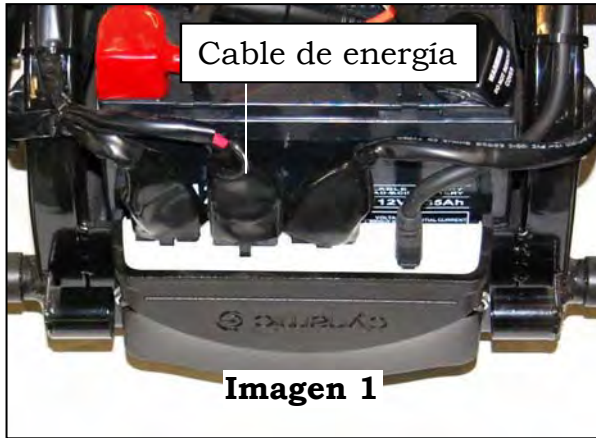

INSTALACIÓN/REMOCIÓN DEL MANDO

1. Afloje el tornillo de ajuste del mando. Vea la imagen 5.
2. Deslice el mando hacia el soporte del mismo en la posición deseada.
3. Apriete el tornillo de ajuste del mando para asegurarlo.
4. Pase el cable del mando entre el tubo receptor del reposabrazos y el asiento. Vea la imagen 18 en la página 20.
5. Conecte el cable al mando y asegure el cable al clip de soporte del mando. Vea la imagen 5.
6. Para desarmarlo, apague el mando y haga el proceso anterior al revés.



ARMADO/DESMONTAJE

ACCEDIENDO A LAS BATERÍAS

1. Remueva el asiento. Refiérase a "Remoción del asiento" en la página 13.
2. Quite las tapas de la batería alzando el borde exterior de las tapas. Vea la imagen 6.

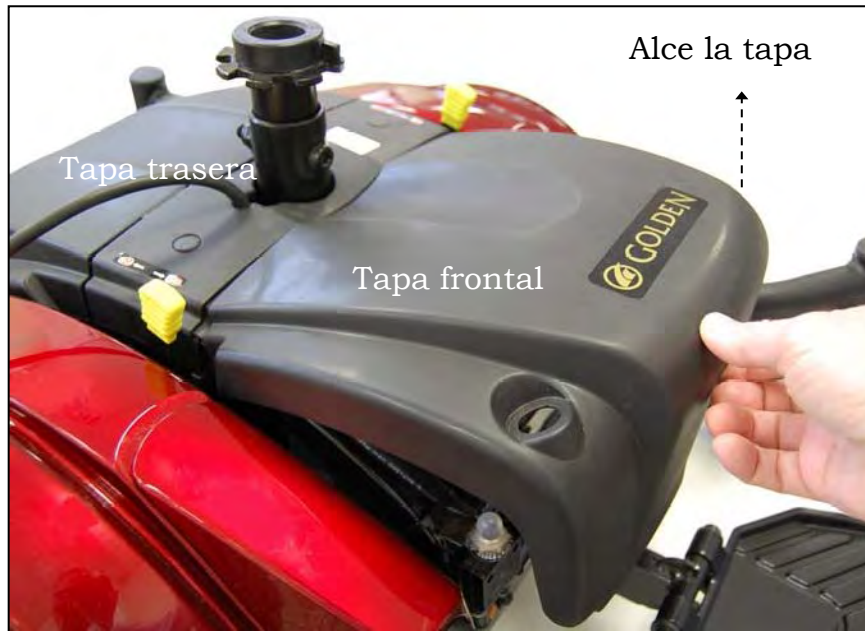


Imagen 6

NOTICE

Hay un "Diagrama de las conexiones de la batería" ubicado adentro de la tapa trasera de la batería. Vea la imagen 7.

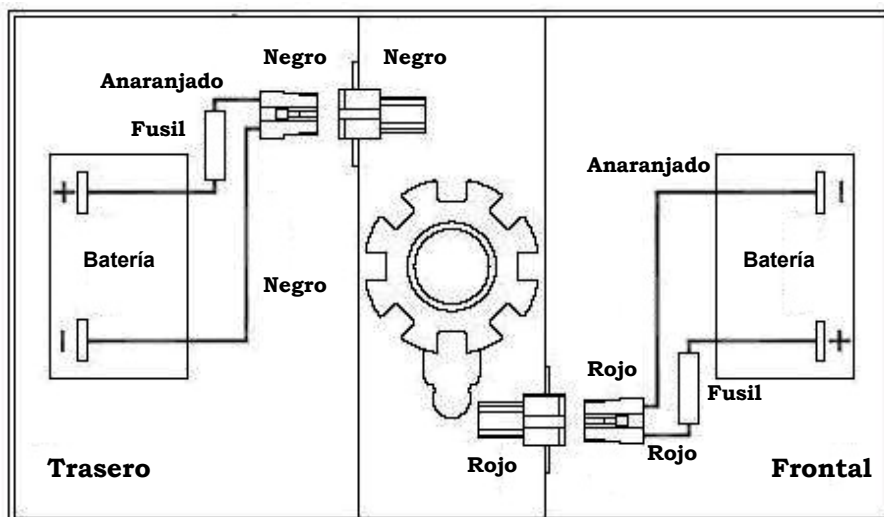


Imagen 7



La baterías pesan 10 kilos cada una. (Los pesos de las baterías pueden variar dependiendo del fabricante). Por favor pida ayuda si no se siente capaz de alzar de forma segura tanto peso.

ARMADO/DESMONTAJE

INSTALACIÓN/REMOCIÓN DE LA BATERÍA

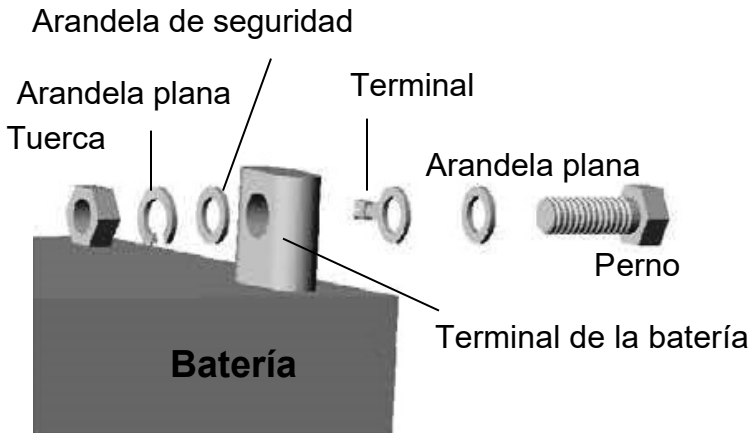


Imagen 8



Imagen 9

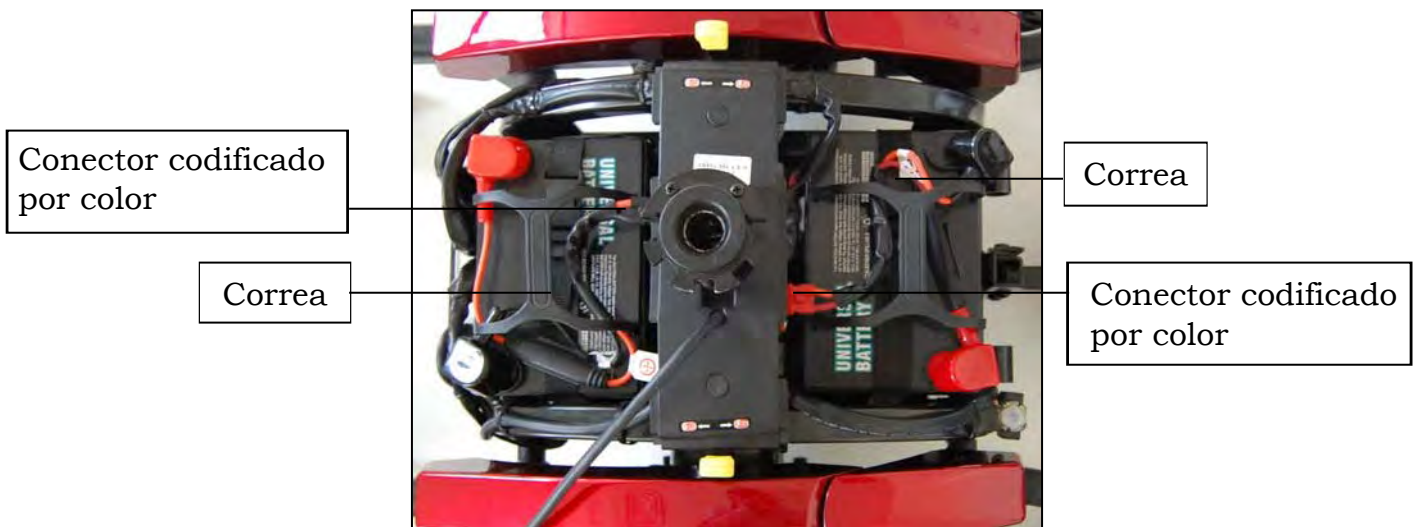


Imagen 10

1. Utilice los tornillos, arandelas y tuercas proporcionadas para conectar el conector positivo (rojo) de cada cable al terminal positivo (+) de cada batería. Vea la imagen 8 y 9.
2. Utilice los tornillos, arandelas y tuercas proporcionadas para conectar el conector negativo (negro) de cada cable al terminal negativo (-) de cada batería.
3. Ponga las baterías en la bandeja de la batería. Asegúrese de que los conectores codificados por colores coincidan. Refiérase al diagrama en la imagen 7 de la página 15.
4. Asegure las baterías en su lugar usando las correas. Vea la imagen 10.
5. Conecte cada conector de batería codificado por color al conector correspondiente en la base de la unidad. Vea la imagen 10.
6. Instale las dos tapas de las baterías.
7. Para desarmar, realice el proceso al revés.

AJUSTES DE COMODIDAD

Es posible que vaya a pasar mucho tiempo en su *Compass Sport*TM. Para proveerle la máxima comodidad, Golden Technologies, Inc. ha diseñado esta silla mecánica para incorporar los siguientes ajustes para la seguridad del operador

AJUSTES DE COMODIDAD

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Altura del asiento | 2. Altura del cabezal | 3. Ángulo del respaldar |
| 4. Ángulo del reposabrazos | 5. Ángulo del reposapiés | 6. Altura del reposapiés |
| 7. Altura del reposabrazos | 8. Grosor del brazo | 9. Longitud del mando |



Asegúrese de que su *Compass Sport* esté apagado antes de realizar cualquier ajuste, para así eliminar el riesgo de que el mando se mueva accidentalmente y se active la silla mecánica.

NOTICE

Si no se siente capaz de realizar estos ajustes de forma segura, por favor contacte a su representante local de Golden.

AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO

El tubo del asiento tiene un diseño que permite ajustar la altura. El ajuste es realizado removiendo el perno del tubo del asiento, alzando o bajando el tubo del asiento a la altura deseada y reinstalando el perno del tubo del asiento. Vea la imagen 11.



Imagen 11

AJUSTES DE COMODIDAD

AJUSTE DE ALTURA DEL CABEZAL

1. Estando detrás de la silla, empuje y entonces suelte la abrazadera en el tubo izquierdo del cabezal mientras hala hacia arriba o empuja hacia abajo el cabezal. Vea la imagen 12.
2. El cabezal hará "clic" y se detendrá en una de las posiciones preestablecidas.
3. Repita el paso 1 hasta que el cabezal esté en la altura deseada.

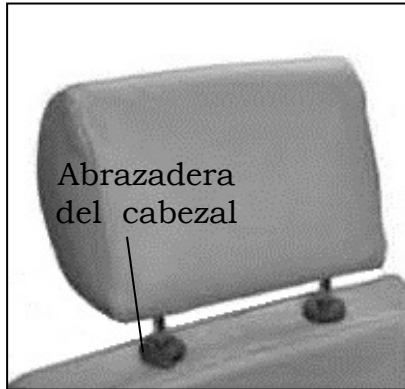


Imagen 12



Imagen 13

AJUSTE DE ÁNGULO DEL RESPALDAR

NOTICE

El respaldar puede ser plegado para minimizar la altura de la silla.

1. Hale hacia arriba la palanca de ajuste (vea la imagen 13) y presione el respaldar hasta llegar a la posición deseada.
2. Suelte la palanca.
3. Para devolver el respaldar a su posición erguida, hale hacia arriba la palanca y mueva el respaldar a la posición deseada.

AJUSTE DEL ÁNGULO DEL REPOSABRAZOS

1. Alce el reposabrazos. Vea la imagen 14.
2. Gire la contratuerca a la izquierda con una llave de 14mm para aflojarla.
3. Gire el perno de ajuste usando una llave Allen de 6mm para subir o bajar el ángulo del reposabrazos. Girar el perno hacia la izquierda subirá el ángulo. Girar el perno hacia la derecha reducirá el ángulo. Gírelo hasta que el ángulo deseado sea alcanzado.
4. Vuelva a apretar la contratuerca girándola a la derecha.
5. Repita los pasos 1-4 en el otro reposabrazos.


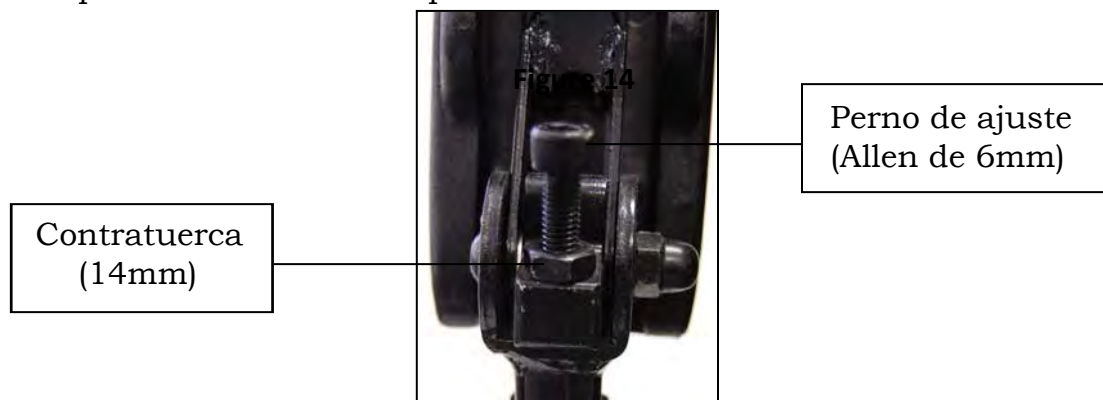


Imagen 14

AJUSTES DE COMODIDAD

AJUSTE DE ÁNGULO DEL REPOSAPIÉS

1. Pliegue el reposapiés hacia arriba para acceder al perno de ángulo. Vea la imagen 15.
2. Gire la contratuerca hacia la izquierda con una llave de 17mm para aflojarla.
3. Utilice una llave Allen de 8mm para girar el perno de ajuste. Gire el perno de ajuste hacia la izquierda para aumentar el ángulo del reposapiés. Gire el perno de ajuste hacia la derecha para disminuir el ángulo del reposapiés.
4. Cuando es alcanzado el ángulo deseado del reposapiés, vuelva a apretar la contratuerca.

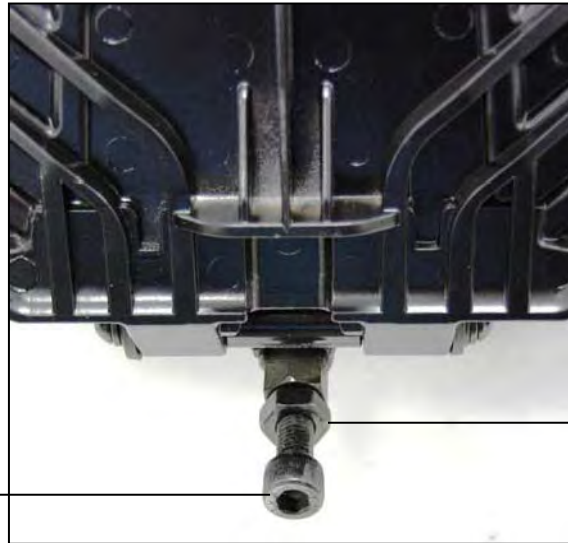

Perno de ajuste de ángulo (Allen de 8mm)

Contratuerca (17 mm)

Imagen 15

AJUSTE DE ALTURA DEL REPOSAPIÉS

1. Remueva la tapa frontal.
2. Utilice un dado de 13mm y una llave Allen de 5mm para remover los pernos. Imagen 16.
3. Deslice el reposapiés a la altura deseada.
4. Alinee los hoyos de los pernos en el reposapiés y el soporte del reposapiés.
5. Instale y apriete los pernos.



Pernos e ajuste de altura del reposapiés (Allen de 5mm)

Tuercas (13mm)

Imagen 16

AJUSTES DE COMODIDAD



Imagen 17



Imagen 18



Imagen 19

AJUSTE DE ALTURA DEL REPOSABRAZOS

1. Afloje los dos tornillos de ajuste de altura del reposabrazo en la parte exterior del mismo con una llave Allen de 3mm hasta que pueda deslizar el reposabrazos hacia arriba y abajo.
2. Suba o baje el reposabrazos a la posición deseada
3. Vuelva a apretar los dos tornillos de ajuste para anclar el reposabrazos en esa posición.
4. Repita los pasos 1-3 para ajustar el brazo opuesto.

AJUSTE DE GROSOR DEL REPOSABRAZOS

1. Afloje la perilla de ajuste en la parte trasera del asiento. Vea la imagen 18.
2. Deslice el brazo hacia adentro o afuera a la anchura deseada.
3. Apriete el tornillo de ajuste para asegurar el brazo.
4. Repita los pasos 1-3 para ajustar el brazo opuesto.

AJUSTE DE LONGITUD DEL SOPORTE DEL MANDO

1. Afloje la perilla de ajuste. Vea la imagen 19.
2. Deslice el tubo de la montura del mando hacia adentro o afuera a la posición deseada.
3. Apriete la perilla de ajuste.

OPERACIÓN

Su Compass Sport es fácil de operar. Sin embargo, para su seguridad y la seguridad de otros, Golden Technologies, Inc. recomienda que usted lea y entienda cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad. Nosotros también recomendamos que practique manejando su Compass Sport en un área libre de cualquier obstáculo. Una vez que haya ganado confianza en su habilidad de controlar su silla mecánica, usted será fácilmente capaz de operarlo en condiciones cotidianas normales.



Antes de encender su Compass Sport, tome nota de su entorno y establezca su control de velocidad en consecuencia. (Vea “Los botones de control de velocidad” en la imagen 20) Para conducir en espacios interiores, nosotros recomendamos que seleccione el ajuste de velocidad más bajo. Para conducir al aire libre, nosotros recomendamos que seleccione un ajuste de seguridad con el que se sienta cómodo, seguro y en control de su silla mecánica. Familiarícese con las funciones de su Compass Sport descritas a continuación y siga las instrucciones para operar de forma segura su silla mecánica.



Imagen 20



La superficie del mando puede ponerse potencialmente caliente cuando esté expuesta a luz solar fuerte por largos periodos de tiempo.

OPERACIÓN

CONDUCCIÓN: Botón de encendido/apagado del mando



Para encender su *Compass Sport*, presione el botón de encendido. Si el sistema está funcional, el indicador de estado (a través del botón de encendido) se iluminará en verde, y el indicador de la batería mostrará el estado de la batería.

Apagado

Si hay una falla en el sistema cuando se enciende la silla, la luz indicadora de estado mostrará una falla con una serie de parpadeos rojos (vea “Diagnósticos”) en la página 25. Si la falla es una que previene que la silla mecánica opere, entonces el indicador de la batería parpadeará continuamente.



Para apagar su *Compass Sport*, presione el botón de encendido; el sistema se apagará y el indicador de estado se apagará.

Encendido

NOTICE


En el caso improbable que la silla mecánica se salga de control, presione el botón de encendido para realizar un FRENO DE EMERGENCIA.

Indicador de inhibición de manejo

El modo de inhibición de manejo es señalado por el indicador de batería con una secuencia de luz de derecha a izquierda.

La secuencia de las luces comienza con la LED verde en el lado derecho, y uno por uno, cada luz LED se encenderá y luego se apagará. Cuando la secuencia se completa en la esquina inferior izquierda con la luz roja, comenzará de nuevo en el lado superior derecho.

La secuencia de luz continúa hasta que la condición del error haya sido despejada.

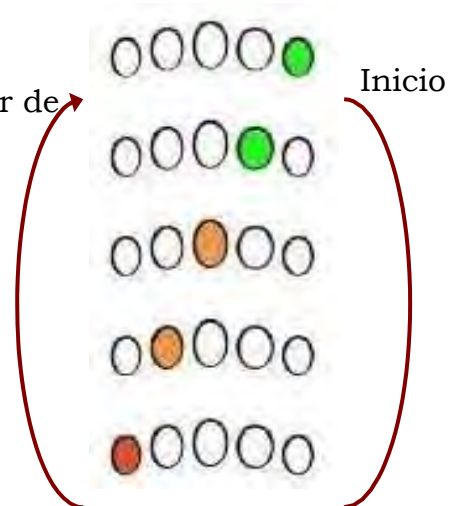

Secuencia de luz la inhibición de manejo

OONAPU

OONAPU (**Fuera de neutro al encenderse**, por sus siglas en inglés) es una función de seguridad que previene el movimiento accidental de la silla mecánica, así sea al encenderse o cuando la silla sale del modo de inhibición de manejo.

Si el sistema LINX LE está encendido (o sale de un estado de inhibición) mientras el mando no está en posición céntrica, será mostrada una **advertencia** OONAPU. Durante una advertencia OONAPU, el indicador LED de la batería parpadeará continuamente para alertar al usuario, y la silla no se moverá. Si el mando es devuelto a la posición central en cinco segundos, la advertencia será despejada y la silla podrá ser manejada normalmente.

Sin embargo, si el mando no es llevado a neutral por más de cinco segundos, ocurrirá un error OONAPU; el error será mostrado por el parpadeo rojo del indicador de estado, y la silla no se moverá. Para eliminar el error, devuelva el mando a posición neutral y apague la unidad y vuélvala a encender.

OPERACIÓN

El mando

El mando (vea la imagen 20 en la página 21) controla la velocidad (hasta el límite máximo establecido por el selector de velocidad) y la dirección de su silla mecánica.

Sacar el mando de la posición neutral (central) moverá su *Compass Sport* hacia la dirección en la que el mando sea empujado.

◆Entre más lo empuje hacia adelante o atrás, más rápido se moverá la silla mecánica.

Para manejar su silla mecánica, empuje el mando suavemente hacia la dirección en la que quiere que se mueva.

◆Operar el mando delicadamente le proveerá cambios más fluidos en la velocidad hacia una dirección.

◆Operar bruscamente el mando resultará en cambios rápidos y drásticos en la dirección y velocidad.

NOTICE

Por su seguridad, el controlador establece automáticamente la velocidad en retroceso, aceleración y desaceleración en proporción al ajuste de control de velocidad.

NOTICE

Cuando no esté moviendo el mando, o cuando usted suelte el mando, este volverá automáticamente a la posición neutral, la silla desacelerará mientras son aplicados los frenos electromagnéticos y la silla se detendrá suavemente.

Controlando la máxima velocidad



El selector de velocidad le permite limitar la velocidad máxima de la silla mecánica (es decir, la velocidad cuando el mando sea completamente empujado) para adaptarse a sus preferencias y entorno.

Selector de velocidad

El selector ofrece 10 pasos discretos entre la velocidad más baja (el selector puesto a la izquierda) y la máxima velocidad (el selector puesto a la derecha)



Símbolo de velocidad

Como un recordatorio visual, un símbolo de velocidad (mostrado a la izquierda) está posicionado justo encima del selector de velocidad para indicar las posiciones mínimas y máximas del selector de velocidad.



El botón de la bocina está ubicado debajo del botón de encendido. Presione el botón de la bocina para hacerla sonar. La bocina seguirá sonando hasta que suelte el botón.

OPERACIÓN

El indicador de la batería

El indicador de la batería está compuesto por cinco diferentes luces LED (1 x ROJA, 2 x ÁMBAR, 2 x VERDES) ubicadas encima del botón de la bocina. El número de luces LED encendidas depende del estado de la batería como se muestra a continuación.



Las luces LED del indicador de la batería también son usadas para mostrar información de carga. Refiérase a “Cargando las baterías” en la página 28-29.

Indicador de la batería

Operación normal

Indicador de la batería Nivel de la batería



Completamente cargada




Considere cargar la batería



La batería necesita ser cargada

Advertencia de alto voltaje

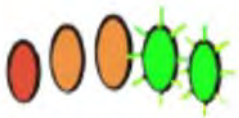

Una advertencia de alto voltaje es indicada al encenderse todas las luces LED mientras parpadean las luces verdes. Esto ocurre cuando el nivel de voltaje de la batería ha subido por encima del punto de advertencia establecido de alto voltaje.

Advertencia de bajo voltaje



Una advertencia de bajo voltaje es indicada al parpadear la luz LED más a la izquierda. Esto ocurre cuando el nivel de voltaje de la batería ha caído por debajo del punto de advertencia establecido de bajo voltaje. **Cargue las baterías inmediatamente.**

Tensión de corte



Cuando el voltaje de la batería cae debajo de la tensión de corte de la batería:

La primera luz LED (roja) parpadeará en el indicador de la batería. El indicador de estado mostrará el código de parpadeo 2. Sonará la bocina una vez cada 10 segundos.

OPERACIÓN/DIAGNÓSTICOS

Para las unidades Compass Sport con el controlador LiNX



Si, cuando es encendido, hay un error con el sistema, entonces el indicador de estado parpadeará en rojo. El número de parpadeos indicará el tipo de error. Estos están descritos en el cuadro a continuación.

Indicador de estado

| Código de P. | Descripción | |
|--------------|----------------------------------|--|
| 1 | Error de mando | Verifique las conexiones y el cableado. Reemplace la Unidad de Control LiNX. |
| 2 | Error de red o configuración | Verifique las conexiones y el cableado. Reemplace la Unidad de Control LiNX. |
| 3 | Error de motor izquierdo | Verifique el motor, las conexiones y el cableado izquierdo. |
| 4 | Error de motor derecho | Verifique el motor, las conexiones y el cableado derecho. |
| 5 | Error de freno de mano izquierdo | Verifique el freno de mano, las conexiones y el cableado izquierdo. |
| 6 | Error de freno de mano derecho | Verifique el freno de mano, las conexiones y el cableado derecho. |
| 7 | Error de módulo (No remoto) | Verifique las conexiones y el cableado LiNX. Reemplace el módulo de energía. |

NOTICE

Los módulos LiNX no pueden ser mantenidos por el usuario. No intente reparar los módulos LiNX.

OPERACIÓN



Imagen 21

MODO RUEDA LIBRE

- ◆ Para desactivar los frenos y poner la silla mecánica en modo rueda libre, hale la palanca de rueda libre hacia arriba. Vea la imagen 21.
- ◆ Para volver a activar los frenos y sacar su silla del modo rueda libre, empuje la palanca de rueda libre hacia abajo. Vea la imagen 21.



Nunca ponga su silla mecánica en modo rueda libre cuando esté en una pendiente o inclinación de cualquier tipo.



Nunca ponga su silla mecánica en modo rueda libre mientras esté operando la silla mecánica.

REDUCCIÓN TÉRMICA

Su Compass Sport está equipado con un sistema de seguridad. Un microprocesador monitorea las temperaturas operativas del controlador. En el caso de que ocurra calor excesivo en el controlador, el controlador disminuirá la velocidad de su silla. Esto se hace para reducir la carga en el sistema eléctrico y permitir que los componentes disipen el calor. El controlador automáticamente establecerá la velocidad de la silla de vuelta a la normal cuando la temperatura operativa vuelva a niveles normales.

EL DISYUNTOR PRINCIPAL

El disyuntor principal es otra función de seguridad incorporada en su Compass Sport. Este dispositivo monitorea la cantidad de corriente siendo consumida de las baterías cuando la silla está en uso. Cuando los motores son muy forzados y una corriente demasiado alta es consumida por las baterías, el disyuntor principal saltará y hará que se detenga su silla. Vea la imagen 22 en la página 27.

OPERACIÓN



Imagen 22

Botón de reinicio

Si el disyuntor principal salta, por favor espere por aproximadamente 1 minuto y entonces presione el botón de reinicio para reiniciar el disyuntor principal. Vea la imagen 22.

NOTICE

Normalmente, la reducción térmica es más sensible que el disyuntor principal. Nosotros recomendamos que apague la silla y espere cinco minutos cuando la silla de repente pierda velocidad o energía. Hacerlo permitirá que los componentes eléctricos sobrecalentados se enfríen y vuelvan a temperaturas operativas.

Características adicionales disponibles para su *Compass Sport*™

Reposapiés con longitud ajustable - Equipamiento opcional requerido

El reposapiés opcional del *Compass Sport*™ le dará la capacidad de extender el reposapiés al simplemente ajustar dos tornillos.

Extensión del reposapiés - Equipamiento opcional requerido

La extensión opcional del reposapiés del *Compass Sport*™ le proporcionará la capacidad de extender el reposapiés inclusive más para tener más espacio para los pies cuando sea necesario al deslizar la extensión hacia afuera hasta la posición deseada.

Extensión de reposabrazos separable - Equipamiento opcional requerido

La extensión separable opcional del *Compass Sport*™ le proporcionará conveniencia posicionando su silla más cerca de una superficie de trabajo como una mesa o escritorio.

Para separar la extensión del reposabrazos, simplemente empuje hacia adentro el lateral del mando.

CARGANDO LAS BATERÍAS



Usted solo debe usar el cargador que es proporcionado con su Compass Sport. El uso de cualquier otro cargador en esta silla mecánica invalidará la garantía. Usar cargadores no autorizados también puede resultar en daños severos a las baterías y/o daños a la silla. Usar el cargador incorrecto también puede ser un peligro.

RANGO OPERATIVO

Dependiendo del uso, el terreno y las condiciones de manejo, las baterías U1 de su Compass Sport™ proporcionarán hasta 31 kilómetros de operación con un usuario de 135 kilos.



¡ADVERTENCIA! Químicos corrosivos adentro de la batería.
Existen condiciones para que explote la batería.



¡ADVERTENCIA! La superficie del cargador se CALIENTA.
¡Peligro eléctrico!

BATERÍAS Y CARGADO

El mantenimiento de la batería es la parte más importante de mantener su silla mecánica. Mantener sus baterías completamente cargadas ayuda a extender la vida útil de las baterías. Utilice los siguientes lineamientos para mantener sus baterías en óptimas condiciones.

¡IMPORTANTE! Las nuevas baterías **DEBEN** ser cargadas completamente antes del uso inicial de su silla mecánica.

Cargue las nuevas baterías por 12 horas inclusive si el indicador de la batería muestra una carga completa. Esto Condiciona las baterías para el máximo desempeño.

• Para uso diario, mantenga sus baterías completamente cargadas. Nosotros recomendamos que enchufe el cargador después de cada uso por 6-8 horas.

“Por favor cargue sus baterías de la noche a la mañana después de cada uso.”

• Si no va a usar la silla por más de una semana, **cargue completamente** las baterías y entonces desconéctelas de la silla mecánica. Vea la imagen 9 en la página 15.

NOTICE

Lineamientos de cargado para maximizar la vida útil de las baterías

- ✓ Utilice solo el cargador automático exterior suministrado para sus rutinas de cargado.
- ✓ Nunca utilice un cargador mojado o de automotor.
- ✓ Evite descargas extendidas y nunca drene las baterías por completo.
- ✓ No deje las baterías bajas por periodos extendidos de tiempo. Cargue una batería descargada tan pronto como sea posible.
- ✓ Recargue regularmente las baterías por completo.
- ✓ Siempre almacene las baterías completamente cargadas.
- ✓ Verifique las baterías almacenadas una vez al mes y recárguelas según sea necesario.

CARGANDO LAS BATERÍAS

CARGANDO LAS BATERÍAS

El sistema de cargado de su *Compass Sport* está diseñado para su seguridad y comodidad. Siga los pasos a continuación para recargar las baterías.

1. Posicione su *Compass Sport* cerca de un enchufe eléctrico de pared.
2. Apague el dispositivo con el mando.
3. Remueva el cargador de su estuche.



El cargador no debe ser conectado al enchufe eléctrico o prendido en este punto del proceso. Por favor verifique antes de proceder.

4. Inserte el conector del cargador en el puerto de carga del mando ubicado en el borde exterior del mando. Vea la imagen 23. **IMPORTANTE: Fallar en alinear los pines antes de insertar el conector en la orientación correcta puede dañar el mando y hacer que su silla de ruedas quede inoperativa.**
5. Inserte el conector al otro extremo del cable cargador en el enchufe estándar de pared.
6. Desconecte el cable de alimentación del enchufe de la pared y del conector de cargado del mando o el paquete de la batería cuando las baterías estén completamente cargadas.

NOTICE Las baterías deberían estar completamente cargadas en ocho horas. Una carga completa es indicada cuando la luz LED del cargador de la batería está en verde y las 5 luces (1 x ROJA, 2 x ÁMBAR, 2 x VERDES) en el mando están iluminadas.


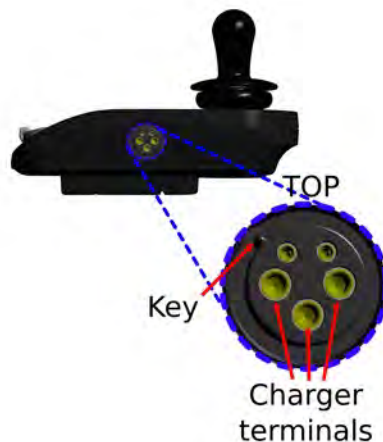


Imagen 23

Cargando las baterías

El medidor de batería indicará que el sistema está siendo cargado al recorrer la secuencia de luces de izquierda a derecha, y entonces muestra el estado de carga aproximado al final de la secuencia. Se previene la conducción mientras el sistema esté siendo cargado. El sistema no tiene que estar encendido cuando se carga la batería, sin embargo, si no está encendido, el medidor de la batería no mostrará el estado de carga/secuencia de luces.

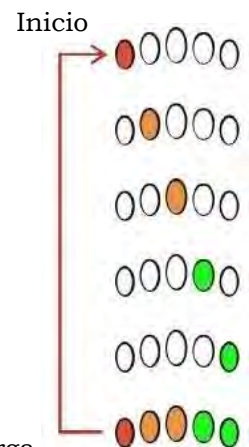

Estado de la carga

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE RUTINA

Su silla mecánica requiere de una cantidad mínima de cuidado y mantenimiento. Si usted no se siente seguro en su capacidad de realizar el mantenimiento listado a continuación, puede programar una inspección y mantenimiento con su proveedor.

- ✓ Asegúrese que sus baterías estén cargadas cada día. Vea “Cargando la batería”.
- ✓ Mientras está apagado, verifique el control del mando todos los días, y asegúrese de devolverlo a posición neutral. Si algún defecto es observado, contacte a su proveedor.
¡No intente repararlo usted mismo!
- ✓ Inspeccione el sistema de asiento, reposabrazos, reposapiés y aparejos delanteros todos los días en caso de que se hayan aflojado o que tengan un desgaste o daño excesivo. Si se observa algún defecto, contacte a su proveedor.
- ✓ Inspeccione regularmente los neumáticos de su silla para comprobar si hay desgaste.
- ✓ Inspeccione regularmente todos los cables y conexiones expuestas en caso de desgaste, daño y corrosión. Haga que su proveedor los repare o reemplace.
- ✓ Mantenga todos los componentes eléctricos (cargador, mando y electrónicos) libres de humedad. Si algunos de estos elementos son expuestos a la humedad, deje que se sequen exhaustivamente antes de intentar operar su silla de nuevo.
- ✓ Verifique periódicamente todos los sujetadores para comprobar si hay desgastes o corrosión. Si hay uno de estos elementos, apague la silla y contacte a su proveedor.



Tenga cuidado con los puntos de pellizco y partes metálicas afiladas (use guantes).

- ✓ Todos los rodamientos están permanentemente lubricados y sellados. No se necesita lubricación extra.

Nosotros recomendamos que verifique lo siguiente:

Banda de rodamiento: Si la banda que queda es menos de 1/32 de una pulgada, haga que su representante de Golden reemplace las llantas desgastadas.

Mando y controlador: Proteja el mando y el controlador de condiciones climáticas adversas. La humedad dañará el controlador e invalidará la garantía de su silla.

Limpieza: Limpie el cuerpo de su silla mecánica con un baño mojado. Utilice agua fría mezclada con jabón para quitar tierra y aceites. Seque con un paño suave limpio. Pula a mano con un paño suave.



No utilice agua de chorro para limpiar su Compass Sport. El agua y las temperaturas extremas son los elementos principales que pueden afectar adversamente su silla mecánica y su desempeño.

Agua, lluvia, aguanieve y nieve

El agua, en cualquier forma, causará el malfuncionamiento electrónico o la corrosión de los componentes eléctricos, conexiones y marcos.

Temperatura

- ◆ En temperaturas extremadamente bajas, las baterías de su silla mecánica podrían congelarse, previniendo que su *Compass Sport* pueda funcionar.
- ◆ En temperaturas extremadamente altas, su silla puede funcionar a velocidades más bajas debido a la función de reducción térmica del controlador que está diseñado para prevenir daños a los motores y a los otros componentes eléctricos de la silla.

XII. GARANTÍA



Garantía Limitada del Consumidor *Sillas mecánicas*

Golden Technologies ha proporcionado información a lo largo del manual de usuario en cuanto al uso y cuidado apropiado de su silla mecánica. Fallar en adherirse a esta información invalidará la garantía de la silla mecánica, sus partes y las baterías proporcionadas por Golden Technologies.

La siguiente garantía es concedida solo para el consumidor INICIAL que compró nuestro producto y comienza en la Fecha de Compra en la que el Consumidor adquirió el producto del Proveedor Autorizado de Golden Technologies. El consumidor debe haber llenado y presentado la tarjeta de registro de garantía ante Golden Technologies para recibir servicio.

La garantía cubre los siguientes modelos de sillas mecánicas a menos que se diga lo contrario:

- ◆ LiteRider Envy GP162
- ◆ Alante Sport' GP205
- ◆ Alante' GP207
- ◆ Compass Sport GP605
- ◆ Compass HD GP620

Garantía limitada de cinco años:

Por el periodo de cinco años desde la fecha de la compra, en el caso de materiales o elaboración defectuosa, Golden Technologies reparará o reemplazará a su discreción cualquiera de los siguientes **componentes estructurales** que un representante autorizado de Golden Technologies descubra que está defectuoso:

- ◆ Armazón de acero*
- ◆ Soldaduras del armazón*
- ◆ Tija del asiento*

**La silla GP605 tiene una garantía LIMITADA DE POR VIDA*

Garantía limitada de trece meses

Por el periodo de trece meses desde la fecha de la compra, en el caso de materiales o elaboración defectuosa, Golden Technologies reparará o reemplazará a su discreción cualquiera de los siguientes **componentes estructurales** que un representante autorizado de Golden Technologies descubra que está defectuoso:

- ◆ Eje de la rueda
- ◆ Horquillas de la rueda
- ◆ Reposapiés
- ◆ Horquillas antivuelco
- ◆ Reposabrazos

Por el periodo de trece meses desde la fecha de la compra, en el caso de materiales o elaboración defectuosa, Golden Technologies reparará o reemplazará a su discreción cualquiera de los siguientes **componentes del tren de manejo** que un representante autorizado de Golden Technologies descubra que está defectuoso:

- ◆ Motor/Caja de cambio
- ◆ Frenos (Solo la función eléctrica)

Nota: Un aumento en el sonido operativo del motor/caja de cambio NO constituye un defecto. Con el desgaste normal, se espera que el sonido operativo aumente.

Por el periodo de trece meses desde la fecha de la compra, en el caso de materiales o elaboración defectuosa, Golden Technologies reparará o reemplazará a su discreción cualquiera de los siguientes **componentes electrónicos** que un representante autorizado de Golden Technologies descubra que está defectuoso:

- ◆ Controlador electrónico
- ◆ Cargador de la batería
- ◆ Arnés de cable (excluye cubre-botas)

Nota: Mientras carga baterías, es normal que el cargador se caliente. El calor que salga del cargador de baterías NO constituye un defecto.

Por el periodo de trece meses desde la fecha de la compra, en el caso de materiales o elaboración defectuosa, Golden Technologies reparará o reemplazará a su discreción cualquiera de las siguientes **partes** que un representante autorizado de Golden Technologies descubra que está defectuoso:

- ◆ Rodamientos
- ◆ Bujes
- ◆ Sistema giratorio del asiento
- ◆ Componentes de goma (Excluye los neumáticos y todas las partes desgastadas)
- ◆ Componentes plásticos (Excluye la carrocería y todas las partes desgastadas)

Garantía limitada de doce meses

Por el periodo de doce meses desde la fecha de compra, en el caso de materiales o elaboración defectuosa, Golden Technologies reemplazará las **baterías** proporcionadas por Golden Technologies si un representante autorizado de Golden Technologies descubre que están defectuosas:

XII. GARANTÍA



Garantía Limitada del Consumidor *Sillas mecánicas (continuación)*

Los artículos no listados están cubiertos bajo la discreción de Golden Technologies. Cualquier accesorio, estándar u opcional, suministrado por Golden Technologies, está cubierto por un periodo de un año desde la fecha de compra de la unidad en particular.

Exclusiones de la garantía:

Golden Technologies no provee garantía en ninguno de los siguientes artículos que pueden requerir de repuestos debido al desgaste normal del uso cotidiano.

- ◆ Ruedas y tubos
- ◆ Cubiertas de plástico ABS
- ◆ Almohadillas de los reposabrazos
- ◆ Escobillas del motor
- ◆ Bombillas/fusibles
- ◆ Carcasas de las baterías
- ◆ Pastillas de freno
- ◆ Tapicería

Esta garantía también excluye lo siguiente:

- ◆ Pérdida o robo de componentes
- ◆ Daños causados por:
 - Derrame o fuga de fluido de baterías.
 - Abuso, uso inapropiado, accidente o negligencia.
 - Operación, mantenimiento o almacenamiento inapropiado.
 - Uso comercial o un uso diferente al normal.
 - Reparaciones y/o modificaciones hechas a cualquier parte sin el consentimiento específico de Golden Technologies..
 - Exceder la capacidad de peso especificada de la unidad.
 - Accesorios aparte de aquellos proporcionados o aprobados por Golden Technologies. Fallar en adherirse a las instrucciones del producto
 - Actos de la naturaleza, como rayos, terremotos, etc...
 - Circunstancias más allá del control de Golden Technologies.
- ◆ CUALQUIER PARTE ALTERADA O REPARADA POR UNA PERSONA NO AUTORIZADA.

Servicio de garantía:

El servicio de garantía debe ser realizado por un representante de Golden Technologies. Golden Technologies se reserva el derecho de reemplazar la o las partes cubiertas por garantía con uno o varios nuevos repuestos a nuestra discreción. Todos los cargos por mano de obra, llamadas de servicio, costos de transporte o cualquier otro cargo asociado con la instalación de cualquier parte cubierta por la garantía son de la responsabilidad del consumidor. La garantía sirve para reemplazar solo las partes y no incluye el flete por los repuestos. Los consumidores no deben devolver ningún artículo a Golden Technologies sin la previa autorización escrita. Cualquier daño incurrido mientras la o las partes cubiertas estén en transporte es de la única responsabilidad del consumidor.

No hay ninguna otra garantía expresa.

Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comerciabilidad e idoneidad por un propósito en particular, están excluidas. Las responsabilidades por daños consecuentes están excluidas. Esta garantía le da derechos específicos y también es posible que tenga otros derechos que pueden variar según el estado en el que resida.

Doble aquí primero

Ponga la
estampilla
aquí

Golden Technologies
401 Bridge St.
Old Forge, PA 18518

Doble aquí después



401 Bridge Street, Old Forge PA 18518
Tel: (800) 624-6374 Fax: (800) 628-5165
www.goldentech.com